

# ProMi

## PROMILLE TESTER

## Atem-Alkoholtest

einfach pusten –  
Promillewert ablesen

Messgenauigkeit

>98%

### Der ProMi PROMILLE TESTER ist ein Einweg-Alkoholtester zur Messung des Alkoholgehaltes in der Atemluft.

Der niedrigste vom ProMi Atem-Alkoholtest ermittelte Alkoholwert liegt bei 0,2 ‰ (Promille) Alkohol im Blut, was ca. 0,1 mg/1 \* Alkohol in der Atemluft entspricht. Ein Alkoholgehalt von 0,2 ‰ im Blut kann bereits die Fähigkeit zum Fahren eines Fahrzeuges so merklich beeinträchtigen, das eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit sowie die Sicherheit im Straßenverkehr für andere Straßenverkehrsteilnehmer besteht.


#### Hinweis:

Bitte beachten Sie; der Alkoholgehalt im Blut steigt innerhalb einer Stunde an, gerechnet ab dem Moment des Alkoholkonsums. Abhängig ist dies aber auch von Geschlecht, allgemeiner Kondition, dem Tempo des Alkoholkonsums, der Art des konsumierten Alkohols, den vorab eingenommenen Mahlzeiten und noch vielen anderen Faktoren.


Der ProMi Atem-Alkoholtest besteht aus einem Glasröhrchen, einer aktiven Substanz in Form von absorbierendem Granulat, 2 Filtern, Aluminiumfolie, zwei Sicherungsaufsätzen (weiße Endkappen) und einer aufgedruckten Farbskala.

#### Verwendungsweise:

1. Die Schutzkappen an beiden Seiten des Alkoholtesters zusammendrücken um die Sicherungsfolie an beiden Seiten zu durchstechen. Drücken sie die Enden bis zum Auftreten eines spürbaren Widerstandes zusammen.

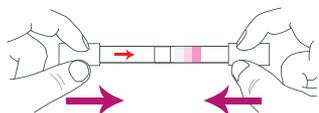

2. Tief Atem holen und in das Mundstück blasen, in Richtung des Pfeils auf dem Alkoholtester. Bitte zwei Mal etwa 10 Sekunden hineinblasen, wobei der Vorgang nicht unterbrochen werden darf. Versichern Sie sich, dass die ausgeatmete Luft aus der anderen Seite des Alkoholtesters austritt. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen die in Punkt 2 genannten Schritte wiederholt werden.

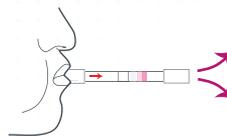

3. Nach zwei, jedoch nicht später als nach fünf Minuten sollte das Testergebnis abgelesen werden. Nach 5 Minuten bitte das Ergebnis nicht mehr bewerten.



4. Wenn sich die vor dem Test weißen Kristalle im Inneren des Röhrchens verfärben, bedeutet dies, dass die Person, die sich dem Test unterzogen hat, unter Alkoholeinfluss steht und in keinem Fall mehr ein Fahrzeug steuern sollte. Den angehoberten Blutalkoholwert in Promille kann man ablesen, wenn man das Ergebnis mit den Farbmustern auf dem Alkoholtester oder mit denen auf der Verpackung vergleicht. Zu beachten ist, dass sich die Kristalle mit verschiedener Intensität verfärben. Weiße Kristalle können trotz nachgewiesenem Alkoholgehalt noch sichtbar sein.



**NEGATIV:** Die meisten Kristalle sind weiss, hellrosa oder dunkelrot, aber immer noch mehr weiß als das erste Farbfeld auf dem Röhrchenetikett. Die relative BAK (Blutalkoholkonzentration) liegt unter dem angezeigten Grenzwert des Teströhrchen (Farbskala).

Sie könnten nach eigenem Ermessen vorsichtig fahren.

**POSITIV:** Die meisten Kristalle haben dieselbe Farbe wie eines der aufgedruckten Farbfelder auf dem Röhrchenetikett, eine Farbe dazwischen oder sind rot. Die relative BAK (Blutalkoholkonzentration) liegt über dem Teströhrchen-Grenzwert.

**FAHREN SIE BITTE IM EIGENEN INTERESSE NICHT MEHR UND/ODER BEDIENEN SIE KEINE MASCHINEN!**

# ProMi

## PROMILLE TESTER

## Atem-Alkoholtest

einfach pusten –  
Promillewert ablesen

Messgenauigkeit

>98%

### Vorsichtsmaßnahmen und Lagerung

- Nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie den Test nicht, wenn das auf der Verpackung aufgedruckte Verfallsdatum überschritten ist.
- Vorsicht: Zerbrechlich, der Test enthält ein Glasröhrchen.
- Sollten die Kristalle mit den Augen oder der Haut in Berührung kommen, spülen Sie sie mit reichlich klarem Wasser ab.
- Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kristalle nicht schlucken oder verzehren.
- Nicht verwenden, wenn das innere Glasröhrchen bereits nach dem Öffnen der Verpackung zerbrochen ist.
- Nicht verwenden, wenn die Farbe der Kristalle nicht weiß ist.
- Nicht in Flüssigkeiten tauchen.
- Lagerung und Anwendung nur zwischen 2° und 30°C und nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Nach der Verwendung in einem Restmüllbehälter entsorgen, da der ProMi Atem-Alkoholtester chemische Produkte enthält.

### Einschränkungen

- Alkohol beeinträchtigt das Urteilsvermögen und die Rhetorik. Das Testergebnis sollte möglicherweise von einer Person interpretiert werden, die nicht unter Alkoholeinfluss steht.
- Nach der Einnahme von Medikamenten, nach dem Essen, Trinken, Rauchen oder Kauen von Kaugummi warten Sie bitte 15 Minuten, bevor Sie den Test durchführen. Anderenfalls könnten möglicherweise falsche Werte angezeigt werden.
- Personen mit Farbenblindheit oder einer anderen visuellen Beeinträchtigung sollten keine Ergebnisse ablesen.
- Interpretieren Sie bitte das Testergebnis unter weißen Glühlampen, Leuchtstoffröhren oder in indirektem Sonnenlicht. Nicht unter Straßenlampen ablesen. Natriumdampf von Straßenlampen kann Farben verfälschen. Verwenden Sie zum Ablesen der Ergebnisse eine Taschenlampe. Richten Sie das Licht auf die Seite des Röhrchens, nicht direkt darauf.
- Bei Aufnahme derselben Alkoholmenge kann die Blutalkoholkonzentration (BAK) je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und anderen Faktoren unterschiedlich sein. Ein verbindliches Ergebnis könnte nur durch eine Blutkontrolle bestätigt werden.
- Handlungen von Personen basierend auf dem Testergebnis erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und Verantwortung der jeweils handelnden Person.
- Die Ergebnisse dieses Tests können unter keinen Umständen für einen Widerspruch gegen Ergebnisse aus polizeilichen Verkehrskontrollen oder Ermittlungen verwendet werden.
- Der Hersteller, der Importeur und/oder der Inverkehrbringer können für Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung, sowie das Testergebnis des Teströhrchens, nicht haftbar gemacht werden.



Hersteller: WEMA Handels GmbH  
Kölner Straße 14–16, 51429 Bergisch Gladbach  
Tel. +49 2204 5843642, Fax +49 2204 4836674  
post@wemahandel.de, www.wemahandel.de

